

アルガード® 鼻すっきり洗浄液™

⚠ 禁忌・禁止

- (1) 鼻の炎症のひどいときは使用を避けてください。
- (2) 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

形状・構造及び原理等

概要:耐圧容器に洗浄液と圧縮空気を充填した製品
原理:圧縮空気により原液を霧状に吐出させる鼻用洗浄器

使用目的又は効果

鼻腔洗浄

使用方法等

- ① **キャップを外す**
カバーキャップを外して、図のようにノズルボタンに指の腹をのせます。



- ② **鼻の中にスプレーする**
ノズルの先を鼻の中にそっと入れて、お好みの量をスプレーしてください。図のように軽く上を向き、ティッシュなどを添えた状態でスプレーするのがおすすめです。
※洗浄液は反対の鼻や口からは出ません。



- ③ **鼻をかむ**
使用後、軽く鼻をかんでください。スプレー後、軽く上を向いたまま鼻をつまんで、洗浄液を鼻の中にしばらくとどめてから鼻をかむのがおすすめです。
- ④ **ノズルの先をふく**
ノズルの先をティッシュなどでふき取り、カバーキャップをして清潔に保管してください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

振らない!傾けない!
容器は振らないでください。また、あまり傾けたり、横にしたり、逆さにして使用しないでください。
(ガスが抜け最後まで使用できなくなる)

使用上の注意

- (1) 耳鼻咽喉科で治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- (2) 使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 洋服などが濡れないようにご注意ください。
- (5) 洗面所などでの使用をおすすめします。
- (6) 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押して、ガスを抜いてください。

保管方法及び有効期間等

- (1) 直射日光の当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
- (2) 小児の手の届かない場所に保管してください。

包装

1本 100mL

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元 小池化学株式会社 埼玉県鴻巣市袋882
048-548-2111
製造元 小池化学株式会社
発売元 ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間9:00~18:00(土・日・祝日を除く)